



Bitte benutzen Sie ausschließlich die von zebris gelieferten Komponenten für die Digitale Modellübertragung.

Führen Sie bitte dem nachfolgenden Schema entsprechend eine Messung durch:

1.

Auswahl des Artikulator-Messmoduls und in den Messeinstellungen des Messmoduls „Artikulator und Datenexport“ auswählen. Die Ausgabe der Werte zur Positionierung sind nur mit der Aufnahme der Oberkieferposition über die Bissgabel Typ SD und die Bestimmung der Unterkieferposition via Bissregistrat in habitueller Okklusion möglich.




2.

Durchführung des Messprozederes anhand des vorgegebenen Messablaufs.



3.

Auswertung der Messung auf Seite 3 des Standard-reports für den Artex Artikulator. Übertragen der Reportwerte auf die Positionierfolie.

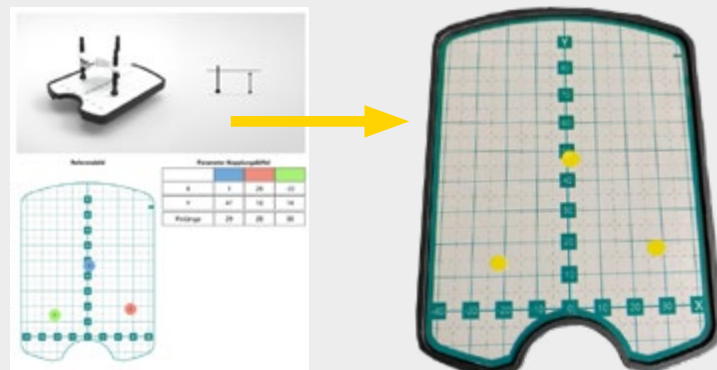

4. Einstellen der Positionierschraubenlänge in der Bissgabel Typ SD anhand der Reportwerte.



**Noch Fragen?**

Rufen Sie uns einfach an:

**06003 814-0**

5. Modellpositionierungstisch auf Artikulator platzieren und Positionierfolie auflegen. Bissgabel mit Positionierschrauben lagerichtig platzieren und OK-Modell auf Bissgabel Typ SD anbringen.



6. OK-Modell mit Gips einartikulieren. Bissgabel und Modellpositionierungstisch entfernen und UK-Modell einartikulieren.



Bitte beachten Sie: Die Gebrauchsanleitung für das System ist zu beachten. Die Verantwortung liegt beim Behandler.