
AlphaDie Separator

zur Isolierung aller Polyätherabdruckmassen.

AlphaDie separating agent

for isolating all polyether impression material.

Séparateur AlphaDie

pour l'isolation de tous les matériaux d'empreintes en polyéther.

Gebrauchsanleitung

Abdruck abspülen.

Mit leichtem Druck ausblasen.

Abdruck mit AlphaDie Separator einsprühen.

Anschließend noch ca. 7 Minuten trocknen lassen.

Dann kann AlphaDie-Stumpfmateriel in herkömmlicher Weise in den Abdruck gegossen werden.

Bitte die Hinweise in den Sicherheitsdatenblätter beachten!

Instructions

Rinse impression.

Blow off with light pressure.

Spray AlphaDie Separator on impression.

Let dry for 7 minutes.

Then AlphaDie material can be poured into the impression as usual.

Please observe the instructions in the safety data sheets!

Mode d'emploi

Rincez l'empreinte.

Soufflez en exerçant une légère pression.

Atomisez l'empreinte avec AlphaDie Separator.

Séchez pendant 7 minutes.

Après AlphaDie, matériaux à die, peut-être coulé dans l'empreinte comme d'habitude.

Veuillez suivre les instructions des fiches de données de sécurité!